

Tربول Perfect Masajeador de Piernas



Manual de usuario

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo y guárdelas para futuras consultas.

ES 1-11

FR 12-22

IT 23-33

DE 34-44

PT 45-55

EN 45-66

■ Contenido

Medidas de seguridad	1
Preguntas frecuentes	2
Especificaciones	4
Resolución de problemas	6
Descripción del producto	7
Instrucciones de uso	8
Notas tras el uso	10
Limpieza	10
Almacenamiento y mantenimiento	11
Atención al cliente	11
El paquete incluye	11

■ Medidas de seguridad

Lea atentamente las siguientes medidas de seguridad para garantizar un uso seguro y correcto del sistema de recuperación de piernas por compresión de aire.

■ Advertencias

No se permite ninguna modificación de este equipo.

1. Si experimenta dolor intenso, algún síntoma inusual o desea retirar los manguitos en caso de emergencia durante su uso:

- Pulse el botón de encendido para detener el aparato o desconectar las mangueras;
- Retire los manguitos y consulte con su médico.

2. Consulte con su médico antes de utilizar este aparato si padece alguna de las siguientes enfermedades:

- Inflamación, infección o dolor de origen desconocido en el lugar de aplicación o cerca de él;
- Fracturas o luxaciones óseas en el lugar de aplicación o cerca de él;
- Recibe tratamiento médico o tiene una contraindicación que requiera el uso de cualquier unidad de control médico.
- Utiliza marcapasos u otros dispositivos médicos susceptibles de sufrir interferencias eléctricas;
- Tumores malignos;
- Enfermedades cardíacas;
- Osteoporosis;

- Padece disfunción grave de la neuropatía periférica o alteración sensorial causada por la diabetes;
 - No es apto para recibir el masaje debido a traumatismos en el cuerpo;
3. Manténgalo fuera del alcance de bebés, niños y personas sin capacidad para utilizarlo de forma autónoma.
 4. No utilice otro adaptador de corriente que no sea el original.
 5. No raye, dañe, procese, doble excesivamente, tire o retuerza el cable de alimentación del adaptador de corriente.
Si no, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
 6. No está permitido su uso cuando el adaptador de corriente no funciona correctamente o el enchufe está suelto.
 7. No enchufe ni desenchufe el adaptador de corriente con las manos mojadas.
 8. No coloque la unidad de control en un edredón o utilice el aparato con temperaturas altas.
 9. Está prohibido remodelar, desmontar o reparar la máquina sin permiso.

■ Precauciones

1. Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con el sistema.
El uso de una diferente puede provocar un funcionamiento incorrecto del sistema.
2. No lo utilice en el baño ni en otros lugares húmedos.
3. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
4. Desenchufe el adaptador de corriente cuando no lo utilice.
5. No camine cuando utilice este dispositivo o cuando lleve los manguitos.
6. No deje el sistema, la fuente de alimentación ni ningún accesorio donde puedan ser dañados por niños, animales domésticos, plagas o líquidos.
7. Los accesorios están diseñados para ser usados por una persona a la vez.

■ Preguntas frecuentes


P1: ¿Cómo funciona este producto?

R1: Se trata de un dispositivo de compresión de aire con 4 cámaras de aire (pie, pantorrilla inferior, pantorrilla superior y muslo) que se inflan y desinflan con una secuencia sofisticada para estimular una presión firme y suave, maximiza el flujo sanguíneo en todo el cuerpo para ayudar con la reducción de dolor muscular o dolores en las zonas tratadas, y mejora la circulación.


P2: ¿Cuántos modos de masaje hay y en qué se diferencian?

R2: Hay 3 modos de masaje, compruebe la diferencia a continuación:


Modo 1: modo secuencia

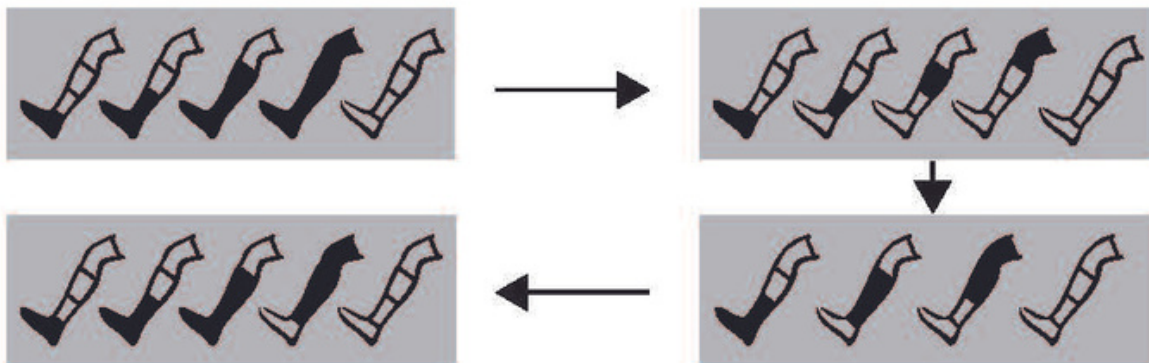

Modo 2: modo circulación

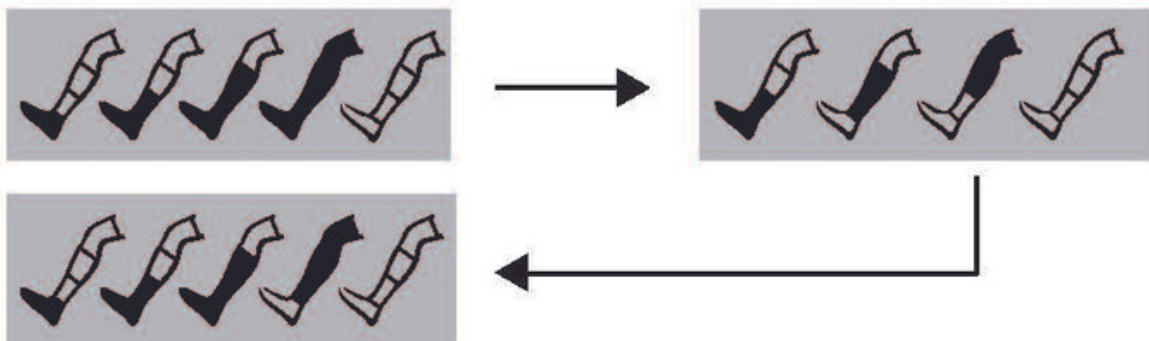

Modo 3: modo combinado

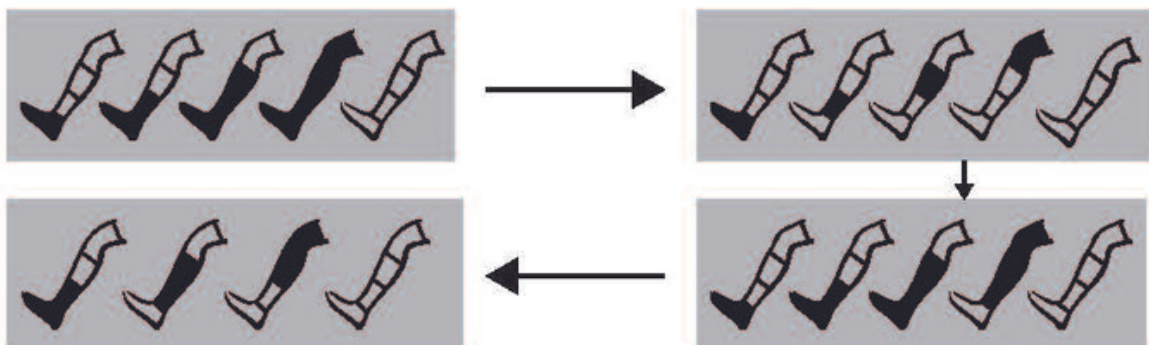

P3: ¿Qué hago si la fuerza del masaje es demasiado débil o fuerte?

R3: Hay 8 niveles de intensidad de masaje disponibles, seleccione la intensidad adecuada para usted. Si siente que es demasiado fuerte en el ajuste más bajo, deje de usar el dispositivo, le sugerimos que consulte con su médico antes de volverlo a utilizar.

P4: ¿Cuánto tiempo debo utilizarlo?

R4: Se recomienda utilizarlo una o dos veces al día durante no más de 30 minutos cada vez. Puede utilizarlo durante más tiempo si se siente muy cansado y quiere que el masaje dure más para aliviar el dolor.

P5: ¿Puedo aplicarlo solamente a una pierna?

R5: Ambos manguitos tienen que estar conectados para que funcione, puede usar uno de los manguitos en la pierna de aplicación y dejar el otro a un lado

inflándose y desinflándose al mismo tiempo, incluso sin nada dentro. Le sugerimos usar ambos al mismo tiempo para obtener un mayor alivio.

P6: ¿Por qué suena la unidad de control ?

R6: El sonido proviene de la bomba de aire situada en la unidad de control que suministra aire de forma continua a las bolsas de aire de los manguitos. Es un sonido bajo y normal.

P7: ¿Cuándo debo utilizar este producto ?

R7: Este producto bombea la sangre, elimina el dolor y la fatiga muscular. Lo puede utilizar siempre que quiera. Puede utilizarlo antes de entrenar para calentar los músculos, después de hacer ejercicio para una mejor y más rápida recuperación o cuando vuelva a casa después de un largo día de trabajo.

■ Especificaciones

Modelo	S9035
Nombre	Trebol Perfect Masajeador de piernas
Adaptador	Entrada de CA: 100~240 voltios , CA 50/60 Hz, Salida de CC: 12V 2A
Potencia nominal	12 W
Modo de compresión	3 modos; secuencia 、 circulación 、 combinado
Niveles de intensidad/Rango de presión	8 niveles: bajo -50 / 60 / 70 mmhg; medio -80 / 90 / 100 mmhg; alto - 110 / 120 mmhg
Duración	3 opciones: 20 / 25 / 30 minutos
Peso del producto	3 KG
Peso del paquete	14 KG
Tipo de manguito	4 cámaras de aire - pie, pantorrilla inferior, pantorrilla superior y muslo
Tamaño de la bota	Entrepierna: 33,9 in; Anchura máxima del muslo: 28,3 in Anchura máxima del pie: 14 in

GARANTIA

En los siguientes casos la garantía según la normativa vigente no se hará efectiva:

- Cualquier daño resultado de cualquier reparación o manipulación no autorizada por la compañía.**
- Cualquier daño resultado de un mal uso, negligencia o accidente.**
- Cualquier daño causado por desastres naturales o voltaje anormal.**
- Cualquier daño resultado de casos de usos de la máquina en otros contextos que no sea el descrito en este manual.**

Para Ampliar Información visite nuestra web:

www.amacoregalos.com




Resolución de problemas

	Causas posibles	Soluciones
No funciona y la pantalla está apagada	1. No está encendido. 2. El adaptador no está bien conectado. 3. Enchufe de pared defectuoso.	1. Pulse el botón de encendido para encender la unidad de control. 2. Asegúrese de que el adaptador de corriente está bien conectado a la unidad de control y a la toma de corriente. 3. Compruebe si la toma eléctrica funciona.
La pantalla está encendida pero los manguitos no funcionan	1. Solo un maguito está conectado a la manguera de aire. 2. Las mangueras de aire no están bien conectadas. 3. Los manguitos están dañados.	1. Funciona solo cuando los 2 manguitos están conectados a la manguera de aire. 2. Compruebe que las mangueras de aire están insertadas correcta y completamente en la unidad de control y en la caja de conexiones (preste atención a la marca "UP"). 3. Compruebe si los manguitos tienen una fuga de aire. Si es así, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
El funcionamiento se interrumpe o deja de bombear	1. Las mangueras de aire no están bien conectadas. 2. El adaptador de corriente se cae. 3. El tiempo de la sesión de tratamiento ha terminado.	1. Compruebe que las mangueras de aire están insertadas correcta y completamente en la unidad de control y en la caja de conexiones (preste atención a la marca "UP"). 2. Asegúrese de que el adaptador de corriente está bien conectado a la unidad de control y a la toma de corriente. 3. El aparato se apagará automáticamente cuando finalice el tiempo preestablecido, pulse el botón de encendido para iniciar una nueva sesión si es necesario;


Descripción del producto

Unidad de control

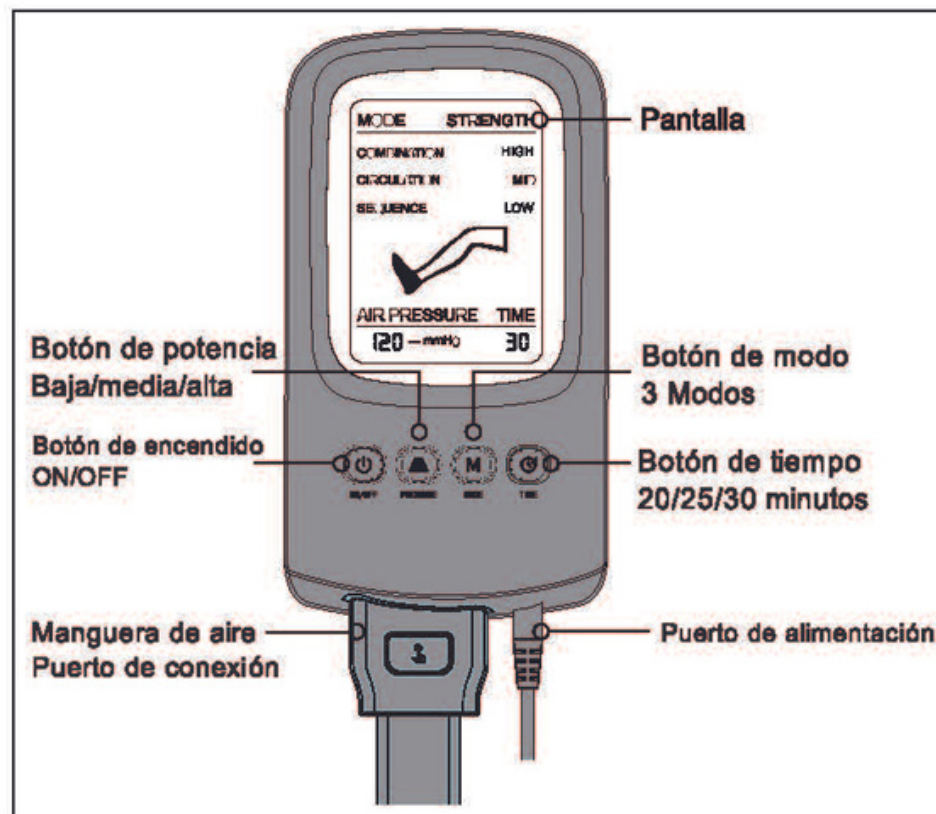


Pantalla

Visualización del ajuste actual y del estado operativo (tiempo restante y rango de presión)

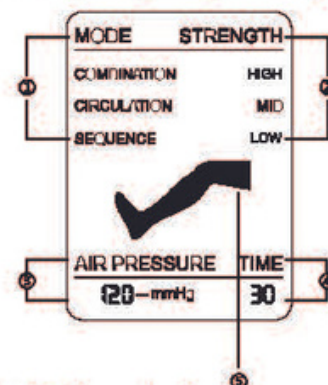


Manguito de masaje

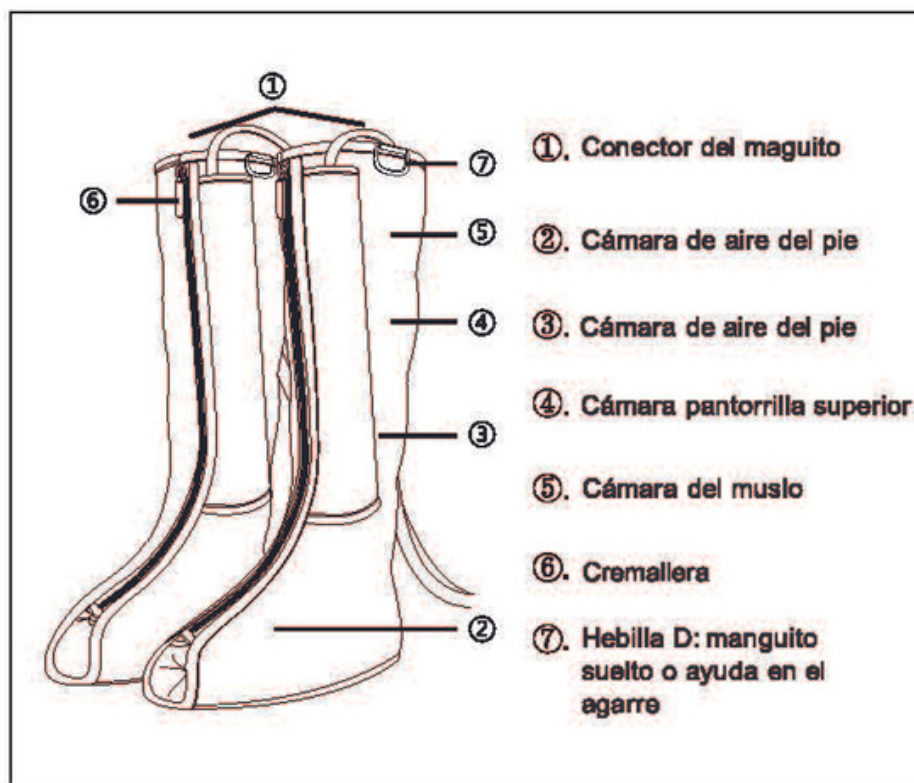

Manguera

1. Caja de conexiones para los manguitos 2. Conector para la unidad de control

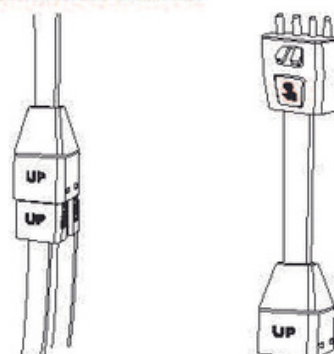

Adaptador





■ Instrucciones de uso

Lea atentamente las medidas de seguridad antes de utilizar el producto.
Para obtener un mejor masaje, utilícelo siguiendo las instrucciones.


1. Inserte el conector del manguito en la manguera.

2. Conecte la manguera a la unidad de control hasta escuchar un clic.





* Es necesario conectar los dos manguitos para que funcione.

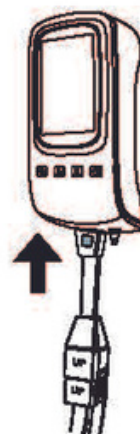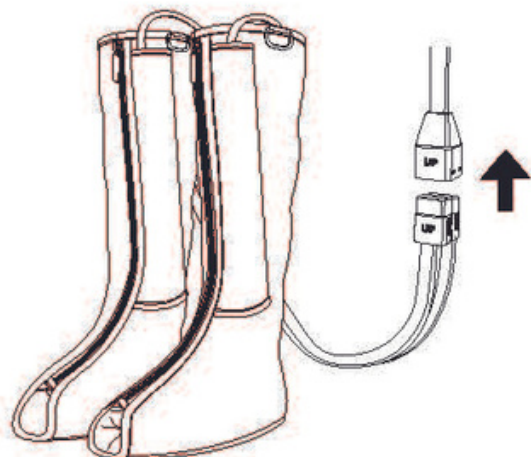

3. Conecte bien el adaptador a la toma de corriente y a la unidad de control, se oirá el sonido "Di" y la pantalla parpadeará durante 1 segundo.

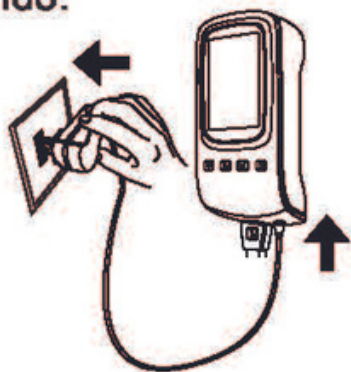

4. Coloque bien los manguitos en la pierna.

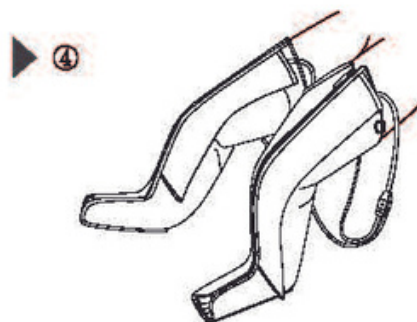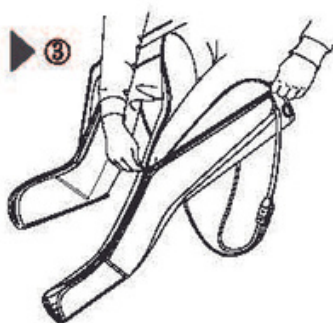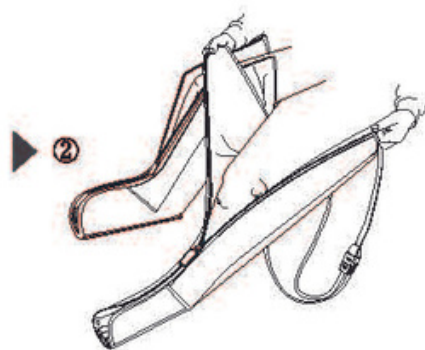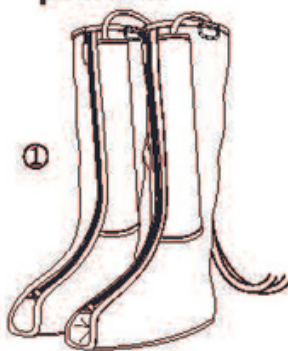

■ Consejos:


- * Asegúrese de que la cremallera esté completamente cerrada antes de usarlo, nunca intente utilizar el sistema con la cremallera parcial o totalmente abierta.
- * Puede utilizar la hebilla D en la parte superior del manguito para colocárselo rápidamente.

ES


5. Busque una posición cómoda sentado, reclinado o tumbado. Pulse el botón de encendido  para iniciar.

1). Se oye el sonido "Di", la pantalla se ilumina y muestra el ajuste actual.

2). Comenzará con la configuración predeterminada de: modo 1 (modo secuencia), intensidad mínima (la más baja), temporizador de 20 minutos.

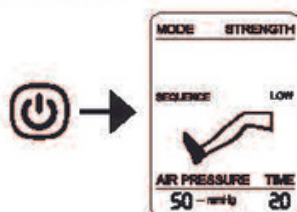

6. Pulse el botón de modo  para cambiar el modo de masaje. 3 modos opcionales, véase la diferencia en las preguntas frecuentes.

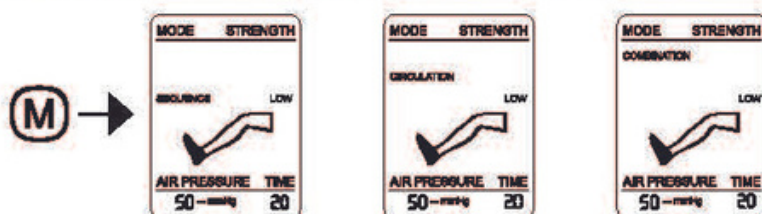


7. Pulse el botón de  intensidad para ajustar la intensidad de la presión del aire, 8 niveles disponibles.

* Le sugerimos que comience con una intensidad baja para el primer uso y que la aumente gradualmente cuando se acostumbre.




8. Pulse el botón de tiempo  para cambiar entre 3 tiempos de sesión de tratamiento, 20 min., 25 min. o 30 min. El tiempo puede ajustarse en cualquier momento mientras la sesión está en curso.

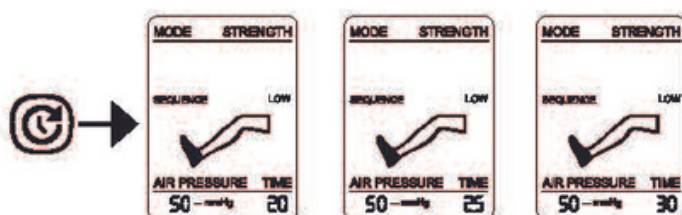

9. El dispositivo se apagará automáticamente una vez finalizado el tiempo de tratamiento, puede pulsar el botón si desea seguir o finalizar el masaje antes en cualquier momento.

■ Notas tras el uso

1. Si ha terminado de utilizar el dispositivo, apague la unidad de control pulsando el botón de encendido y desconecte el adaptador de la unidad de control y de la toma de corriente.
2. Desconecte la manguera de la unidad de control pulsando el botón en la parte superior de esta y tirando hacia fuera.
3. Desconecte los manguitos de la manguera y quíteselos de las piernas.
4. Guarde todos los accesorios en el embalaje original o en la bolsa de almacenamiento.

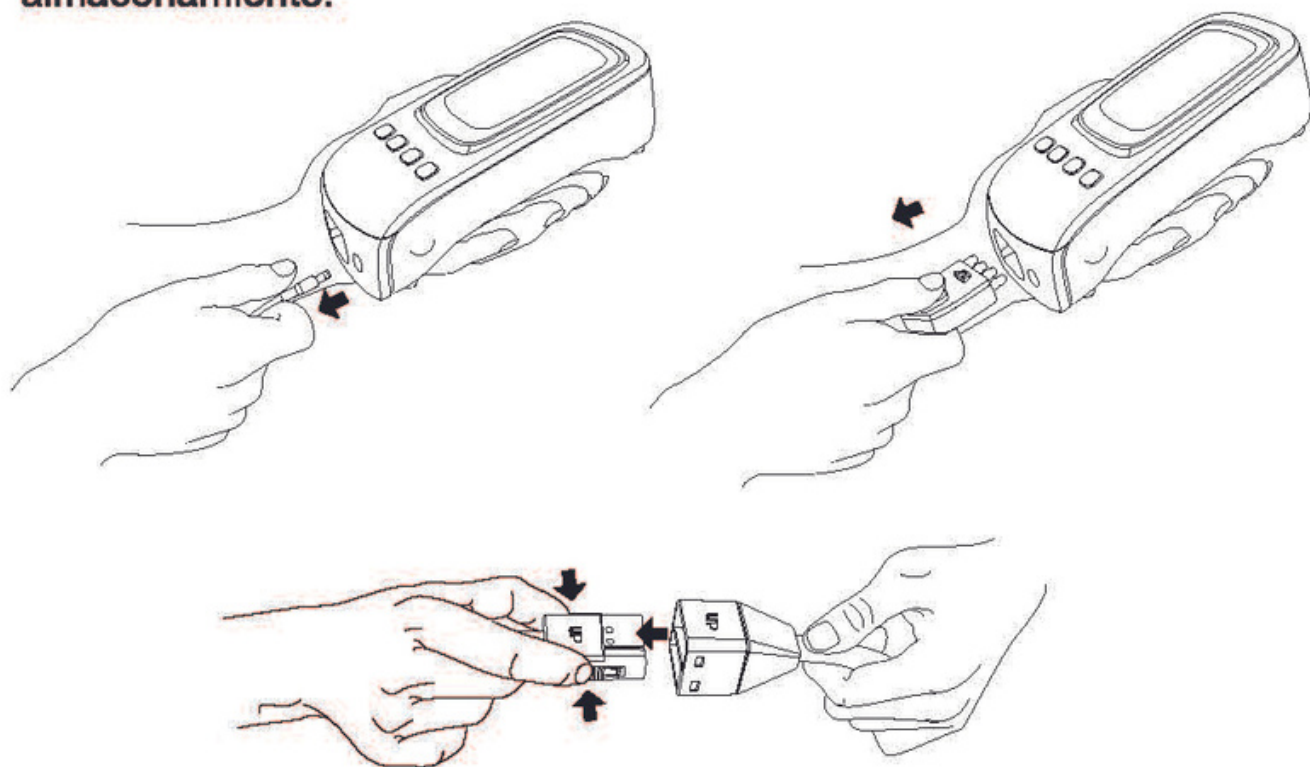

■ Limpieza

Asegúrese de cortar la corriente antes de limpiar el aparato.

1. Si están sucios, limpie la unidad de control, los manguitos y las mangueras con un paño húmedo y limpio.
2. Séquelos bien con un paño limpio.
3. No utilice gasolina, alcohol, diluyente y otros líquidos irritantes para limpiar el aparato en caso de que pueda causar un mal funcionamiento o los componentes se dañen o descoloren.
4. No permita que entren agentes externos en las mangueras.
5. No limpiar en seco.

ES

■ Almacenamiento y mantenimiento

1. No desmonte el aparato usted mismo. No tiene piezas reparables por el usuario. En caso de necesitar mantenimiento o reparación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
2. Manténgalo fuera del alcance de bebés, niños y personas sin capacidad para utilizarlo de forma autónoma.
3. No lo coloque en condiciones de alta temperatura y humedad.
4. Evite la luz solar directa.
5. Evite objetos puntiagudos que puedan pinchar manguitos y mangueras.
6. No coloque objetos pesados encima.
7. Mantenga los puertos abiertos de la unidad de control, la interconexión de mangueras y la entrada de alimentación libres de residuos.
8. No permita que se acumulen pelusas o polvo en la unidad de control o en las interconexiones de las mangueras. Si esto ocurre, limpie el sistema con un paño seco antes de utilizarlo.

■ Atención al cliente

Estimado Cliente, ante cualquier duda relacionada con este artículo, puede ponerse en contacto con nuestro SAT. Estaremos encantados de poder ayudarle.

info@amacoregalos.com

■ El paquete incluye:

- 2 manguitos de masaje (con mangueras conectadas)
- 1 unidad de control
- 1 conector de manguera
- 1 adaptador de corriente/CA100~240 V, 50/60 Hz; CC12V1A
- 1 manual de usuario
- 1 bolsa de almacenamiento portátil



ES

Los materiales de desecho de productos eléctricos no deben echarse al contenedor de basura junto con el resto de desperdicios del hogar. Estos materiales deben devolverse a la tienda donde se adquirieron o bien llevarlos a un punto específico para su reciclaje o eliminación. Según la normativa de la 2002/96/EC.